

## Entsorgung

- Die Einlagen können gemäß den örtlichen Bestimmungen im normalen Hausmüll entsorgt werden.

## Haftung

Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt, in der von uns abgegebenen Ausführung. Bei Veränderung durch Dritte erlischt der Rechts- und Garantieanspruch. Leichte Verfärbungen und Ausbleichen der Decksohle sind während der Tragedauer der Einlagen möglich. Sie stellen keinen Grund für Gewährleistung dar.

Stand der Gebrauchsanweisung: 2021-04-12



**foot power**<sup>®</sup>  
*Ich steh' drauf!*



Medizinprodukt/Sonderanfertigung  
Orthopädische Schuheinlage



Rückverfolgbarkeit des Medizinproduktes:



nicht über 30 Grad erhitzen



einzelner Patient mehrfach anwendbar



Gebrauchsanweisung beachten

# Gebrauchsanweisung für individuelle Einlagen nach Jahrling

Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sie enthält viele wichtige Informationen und Sicherheitshinweise!



**foot power**  
*Ich steh' drauf!*

## Hersteller:

**foot power**<sup>®</sup>  
*Ich steh' drauf!*



**footpower Gießen GmbH**

**Schiffenberger Weg 59 | 35394 Gießen**

**Fon (0641) 74155 | Fax (0641) 74145**

**E-Mail: [info@giessen.footpower.de](mailto:info@giessen.footpower.de)**

## Zweckbestimmung/Indikation:

Vorliegende maßgefertigte, orthopädisch-funktionell-aktive Einlage und deren Zubehör entsprechen der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745. Einlagen sind funktionelle Orthesen zur Vorbeugung und Behandlung von Beschwerden des Muskel-Skelett-Apparates oder bei systemischen Erkrankungen (z.B. Diabetes mellitus). Sie dienen der Korrektur von Gelenken der unteren Extremitäten sowie des Rumpfes, zur Minderung von Handlungsdefiziten des Bewegungsapparates, zur Lastumverteilung und Bettung der Fußweichteile bei vorliegenden Deformitäten. Einlagen sind den Gegebenheiten des Fußes individuell anzupassen. Nur zur Verwendung mit gesunder und unverletzter Haut.

## Hinweise

- Bei Bedarf die tägliche Tragezeit langsam erhöhen, um die Füße an die Einlage zu gewöhnen.
- Sollten allergische Reaktionen auftreten, muss die Einlagenbehandlung umgehend unterbrochen und der footpower Techniker oder der Arzt kontaktiert werden.
- Sollte das Tragen der Einlagen Schmerzen oder Blasenbildung verursachen, muss die Einlagenbehandlung umgehend unterbrochen und der footpower Techniker oder der Arzt kontaktiert werden.
- Jede dauerhafte Rötung oder Hautveränderung bedarf der Kontrolle durch Ihren footpower Techniker oder Ihren Arzt.
- Bei Empfindungsstörungen am Fuß ist eine Sichtkontrolle auf Hautveränderungen mehrmals am Tag durchzuführen.
- Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Materialermüdung und Funktionsverlust bis zur vollständigen Beschädigung der Einlage führen.
- Einlagen dürfen nur im Nassbereich verwendet werden, wenn diese speziell hierfür gefertigt wurden.
- Einlagen dürfen nur im Arbeitssicherheitsschuh getragen werden, wenn diese speziell baumustergeprüft für vorliegende Sicherheitsschuhe (DGUV 112-191) gefertigt wurden.

## Anwendung

- Einlagen nur in dafür geeignetem Schuhwerk tragen.
- Schuhe und Einlagen müssen aufeinander abgestimmt sein.

- Einlagen müssen stets mit Strümpfen getragen werden.
- Bei Problemen mit der Einlage umgehend Ihren footpower Techniker kontaktieren.

## Pflegetipps (Reinigung/Desinfektion)

- Zur hygienischen Pflege können die Einlagen in einem Waschbeutel bei 30° in der Feinwäsche gewaschen oder mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Die Einlage nicht im Trockner, auf der Heizung oder mit anderen direkten Wärmequellen trocknen. Dies kann zu unerwünschten Materialveränderungen und Passformverlust führen.
- Lederbezogene Einlagen zum Lüften aus dem Schuh nehmen und schonend trocknen.
- Bei starken Verschmutzungen oder Kontakt mit Körpersekreten müssen die Oberflächenbezüge ersetzt werden, da eine ausreichende Desinfektion nicht sichergestellt werden kann.
- Für Medizinprodukte aus Kunststoff nur handelsübliche Flächen-desinfektionsmittel verwenden.
- Der Kontakt mit Säuren oder Lösungsmitteln muss vermieden werden.
- Sollten sich Veränderungen am Material zeigen, kontaktieren Sie umgehend Ihren footpower Techniker.
- Die Einlagen sollten in regelmäßigen Abständen von Ihrem footpower Techniker kontrolliert werden. Insbesondere bei Kindern im Wachstum oder bei spezifischen Indikationen.